

VIRUS OUT AEROSOL

Disinfettante aerosol pronto all'uso

VIRUS OUT AEROSOL – Composizione

100 g di prodotto contengono:

Cloruro di benzalconio (Cas n. 68424-85-1)	g 0,15
Etanolo ((Cas n. 64-17-5)	g 59,0
Coformulanti e propellente q. b. a	g 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo:

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.

H222 Aerosol altamente infiammabile

H319 Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P280 Proteggere gli occhi.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P403 Conservare in luogo ben ventilato.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

Reg. n. 21378 del Ministero della Salute

Titolare registrazione:

Copyr S.p.A. Via G. Stephenson, 73 20157 Milano Tel. 02/3903681 www.copyr.eu

Officine di produzione:

MI1 Tosvar S.r.l. Pozzo d'Adda (MI)

ES Zelnova Zeltia S.A. Porriño, Pontevedra (Spagna)

Lotto n.

del:

Validità: 2 anni

Contenuto netto: ml 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750

Caratteristiche:

Disinfettante pronto all'uso, elimina il 99% dei batteri presenti sulle superfici, efficace anche contro virus e funghi (lieviti compresi).

Campo d'impiego:

Il prodotto in formulazione aerosol è destinato alla disinfezione di superfici in ambienti medico-ospedaliero (ospedali, studi medici e dentistici, A.T.S.), abitazioni, negozi, bar, ristoranti, mezzi di trasporto (treni, aerei, autobus, taxi, metropolitane), scuole, palestre e chiese.

Adatto anche per la disinfezione delle superfici di unità interne ed esterne di impianti di climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione.

Modalità d'uso:

Nebulizzare direttamente il prodotto sulle superfici da disinfettare o erogare preventivamente il prodotto su panno e strofinare leggermente la superficie.

Per l'uso professionale lasciare agire il prodotto per:

- 5 minuti per attività battericida, fungicida e lieviticida sia in condizioni di pulito che di sporco
- 30 minuti per attività virucida in condizioni di pulito (detergere la superficie prima dell'utilizzo). Usare una quantità sufficiente a mantenere bagnata la superficie per il tempo di azione richiesto (detergere la superficie prima dell'utilizzo). In ospedali e aree sanitarie usare solo su superfici che non vengono toccate frequentemente.

Per l'uso non-professionale lasciare agire il prodotto per:

30 minuti per attività battericida, fungicida, lieviticida e virucida in condizioni di pulito (detergere la superficie prima dell'utilizzo). Usare una quantità sufficiente a mantenere bagnata la superficie per il tempo di azione richiesto (detergere la superficie prima dell'utilizzo). In ospedali e aree sanitarie usare solo su superfici che non vengono toccate frequentemente.

Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta del prodotto prima dell'utilizzo. Conservare il prodotto in luogo ben ventilato, lontano da ogni fonte di calore. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande e/o recipienti destinati a contenerne.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

V2

Distribuito da:	Logo marchio
Copyr SpA	 <p>The image displays five logos for different brands. At the top is the 'Copyr' logo in green with a stylized flower icon. Below it are four other logos: 'casa jardin' in a green and yellow floral shape, 'ZZ PAFF' in green block letters, 'ZZ Kill' in red block letters, and 'Ebogon' in blue block letters with a red and black insect icon.</p>